

Käyttöohje

deconex® LUBE SPRAY

Kirurgian instrumenttien hoitoaine

Saranallisten instrumenttien manuaaliseen hoitoon



Ominaisuudet

deconex® LUBE SPRAY on laadukas instrumenttien hoito-suihke, joka on tarkoitettu niveliä, liukupintoja, kierteitä, sulkimia ja muita liikkuvia osia sisältävien kirurgian instrumenttien, kuten puristinten, pihtien, saksien, lävistinten, neulanpitimien, haavanlevittimien, ligaattorien sekä käsi- ja kulmakappaleiden manuaaliseen hoitoon huolellisen puhdistuksen ja desinfiointin jälkeen, mutta ennen sterilointia.

deconex® LUBE SPRAY sisältää yksinomaan lääketieteellistä valkoöljyä eikä se sisällä mitään mahdollisesti allergiaa aiheuttavia lisäaineita. deconex® LUBE SPRAY jättää käsiteltävälle pinnalle ohuen kalvon, joka estää metallin hankautumisen metallia vasten ja suojaa nivellettyjä instrumentteja tehokkaasti hankauskorroosiolta, ruostumiselta, tummumiselta ja värjäytymiseltä sekä ennenaikaiselta kulumiselta.

Instrumentteihin jäävä valkoöljy on todettu höyryä läpäiseväksi ja yhteensopivaksi höyrysteriloinnin kanssa sekä lääke- ja elintarvikelainsäädännön mukaisesti toksikologisesti turvalliseksi.

Ainesosat/koostumus

- Lääketieteellinen valkoöljy (Euroopan farmakopea)
- Ponneaine propaani/butaani

Käyttö ja annostus

Asiamukainen instrumenttien hoito edellyttää, että instrumenttien annetaan huolellisen puhdistuksen ja desinfiointin jälkeen jäähtyä huoneenlämpötilaan ennen tuotteen suihkuttamista, muuten osien liike voi aiheuttaa metallin hankautumista ja pintavaurioita.

deconex® LUBE SPRAYtä saa suihkuttaa vain täysin kuiviin instrumentteihin.

Suihkuta nivelet, saranat ja liukupinnat deconex® LUBE SPRAYllä lyhyesti ja tarkasti mahdollisimman läheltä käyttämällä sopivaa tuotteen mukana toimitettua suihkupäätä. Pidä tölkki suihkutuksen ajan mahdollisimman pystyssä. Jotta voiteluaine leviäisi pintoihin tasaisesti, liikuta niveliä, liukupintoja ja muita liikkuvia osia tuotteen suihkutuksen jälkeen. Pyyhi liika öljy pois käyttämättömällä, puhtaalla pyyhkeellä ennen sterilointia.

Materiaaliyhteensopivuus

deconex® LUBE SPRAY sopii kaikille lääkintälaitteissa yleisesti käytetyille materiaaleille.

Muoveilla yhteensopimattomuutta saattaa esiintyä muovityypin mukaan.

Testaa yhteensopivuus aina ennen kuin käytät tuotetta arkojen materiaalien voiteluun. Ota tarvittaessa yhteyttä Borer Chemie AG:hen.

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

pH	neutraali
Tiheys	0,85 g/ml
Ulkonäkö	väritön

Turvallisuusohjeet ja tuotteen hävittäminen

Katso työturvallisuusohjeet ja ohjeet tuotteen asiamukaiseen hävittämiseen sen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Vältä aerosolien muodostumista ja hengittämistä.

Tyhjien pakkausten hävittämisessä on noudatettavia paikallisia jätteitä ja jätevesiä koskevia säännöksiä.

Tölkki on kierrätettävää alumiinia.

deconex® LUBE SPRAY

Varastointi ja kuljetus

Varastoi tuote 5–25 °C:n lämpötilassa.

Suojattava suoralta auringonvalolta ja pidettävä erillään lämmönlähteistä ja sytytyslähteistä.

Pakkauskoot

Pakkaustyyppi	Sisältö	Tuotenro
6 tölkin laatikko	6 x 200 ml	520900.00-CA06

Jokaisen tölkin mukana toimitetaan kaksi eripituista suihkusuutinta, joita voidaan tarvittaessa lyhentää.

CE-merkintä

deconex® LUBE SPRAY täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY lääkintälaitteille asettamat vaatimukset.

Muunkielisiä etikettiversioita on ladattavissa valmistajan verkkosivuilta osoitteesta:

<http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/>

Jakelija:

Valmistaja:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, CH-4528 Zuchwil / Sveitsi

Puh. +41 32 686 56 00 Faksi +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

